

**VOLK**  
do Brasil

# SENSI PLUS

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.60.007.02

COR: Azul

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Nitrila

CA: 47.448 | VALIDADE DO CA: 30/03/2031

CA: 53.500 | VALIDADE DO CA: 23/03/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

CA: 53.500

EN 374-5

EN 374  
Tipo B

JKOPT

CA: 47.448

EN 374-5

EN 374  
Tipo A

AJKOPT

- 100% NITRÍLA  
Livre de proteínas do látex
- ÓTIMA SENSIBILIDADE TÁTIL COM RESISTÊNCIA QUÍMICA  
Aumento de produtividade
- SEM AMIDO – CANO LONGO
- DESCARTÁVEIS E AMBIDESTRAS
- ÓTIMA ADERÊNCIA  
Com palma ou ponta dos dedos texturizadas
- PROTEÇÃO DO USUÁRIO E DO PRODUTO

## DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em nitrila, totalmente texturizada, sem pulverização de amido.

## INDICADA PARA

Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Proteção química ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de \*óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. Utilizadas também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovinos), high-tech, automotivas, metalmecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, periféricos, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos, e outras.

## NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

### ISO 374 - Riscos Químicos - Tipo A

| ENSAIOS                    | CLASSE | CA:47.448 | CA:53.500 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|
|                            |        | NÍVEL     | NÍVEL     |
| Metanol                    | A      | 2         | --        |
| N-Heptano                  | J      | 4         | 3         |
| Hidróxido de Sódio 40%     | K      | 6         | 6         |
| Hidróxido de Amônio 25%    | O      | 3         | 2         |
| Peróxido de Hidrogênio 30% | P      | 6         | 6         |
| Formaldeído 37%            | T      | 6         | 6         |



\* Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da Sensi Plus em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na EN 374.

## SEGMENTOS

Cosmético e estéticas, Eletroeletrônica, Food service, Frigoríficos, Indústria alimentícia, Indústrias químicas, Limpeza profissional, Metalmeccânica, Petroleiras, Varejo alimentício.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Indicada para a proteção das mãos de trabalhadores da saúde que necessitem de proteção durante procedimentos não cirúrgicos leves, tais como manuseio e higiene de instrumentos, esvaziamento de vasilhame com vômito, limpeza de fluidos corporais derramados, aplicação de injeção subcutânea ou intramuscular, aferição de pressão arterial, temperatura ou pulso; e procedimentos não cirúrgicos médios, tais como contato membrana mucosa, pele não-integra e sangue, inserção e/ou remoção de dispositivo intravenoso, coleta de sangue, exames vaginais e pélvicos, em hospitais, laboratórios clínicos, clínicas estéticas, consultórios odontológicos.

**Condições de Manipulação:** Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, para manipulação das luvas. Após o uso, descarte-as em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e de acordo com o tipo de contaminação nas luvas.

## INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Destruir após o uso;
- Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;
- Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva; O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

**Precauções:** Armazene as luvas de acordo com as indicações, a fim de evitar danos e contaminações, pois o uso de luvas contaminadas pode resultar na transmissão de microrganismos. O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com água e sabão antisséptico. Não use o mesmo par de luvas para o atendimento de mais de um paciente.

## ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

## EMBALAGENS - Códigos de Barras

| TAMANHO | EAN13 (Inner com 100 peças) | DUN 14 (Caixa com 10 inners) |
|---------|-----------------------------|------------------------------|
| 6 (EP)  | 7898207215135               | 17898207215132               |
| 7 (P)   | 7898207211656               | 17898207211653               |
| 8 (M)   | 7898207214091               | 17898207214098               |
| 9 (G)   | 7898207214107               | 17898207214104               |
| 10 (EG) | 7898207214114               | 17898207214111               |

## DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055  
sac@volkdoBrasil.com.br  
volkdoBrasil.com.br

